






## YÜZ KORUMA KALKANI KULLANMA KİLAVUZU

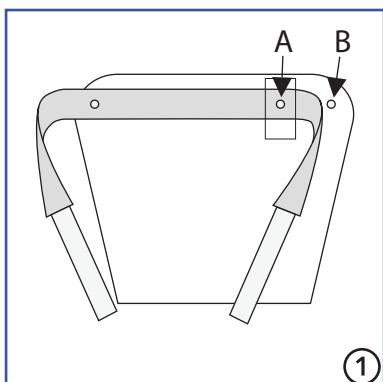

Koruyucu maskeyi torbasından çıkarın

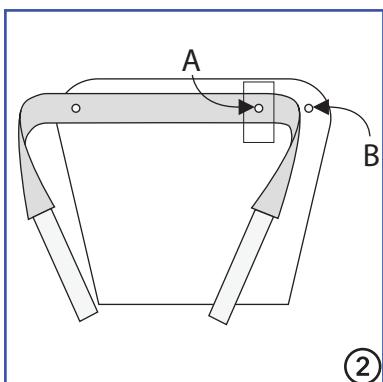


Mavi alın bandının üzerine etiketle sabitlenmiş Pop Çıçığının erkek parçasını (A) şeffaf kalkan üzerine takılı olan dişi karşılığının (B) üzerine getirin

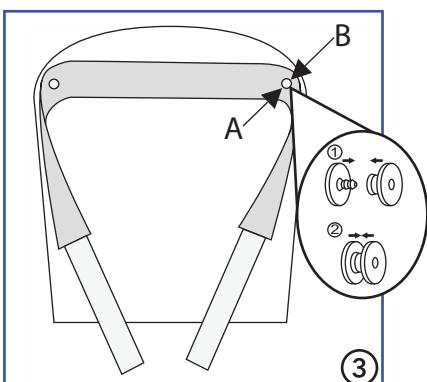

İç içe geçirerek Pop Çıçığını sabitleyin

### SCHÜTZERMED® FPS

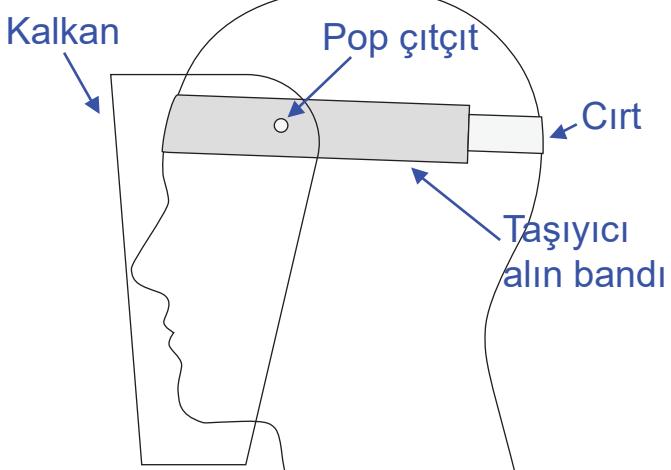

#### Teknik Özellikler

Koruyucu şeffaf kalkan

Hammadde: Food contact, Antifog PET

Ölçüler: 28 x 22,5 cm (en x boy)

Kalınlık: 250 mikron

Renk: Şeffaf


Başı saran alın bandı

Hammadde :Hava geçirgen PP SB nonwoven kumaş

Renk : Mavi

Velcro cırt : Beyaz

1 ürünün net ağırlığı : 21,7 gr

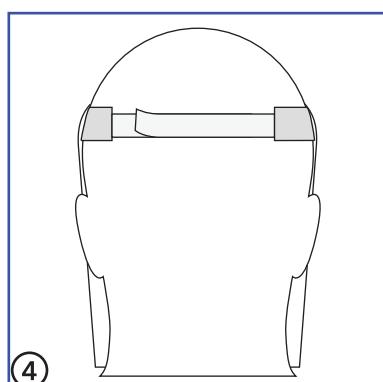

Bandı alınızca sarın ve kafanızca ayarlayarak başınızın arkasında sabitleyin

### UYARILAR

Yüz kalkanıyla ateşe yaklaşmayın

Çocuklar yetişkin denetimi altında kullanmalıdır

Su ve sabun içerikli temizlik malzemeleri

kullanarak elde yıkanıp temizlenebilir

