

ÜRÜN TANITIM KARTI



Uej Ãv| gto gf 'Mıruk



Uej Ãv| gto gf 'Mask



Uej Ãv| gto gf 'Sticker



Uej Ãv| gto gf 'Yota

Adı:

Schützermed

Tanımı:

Fototerapi Göz Koruma Bandı

Kullanıldığı alanlar:

Yeni Doğan bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Fototerapi tedavisine giren bebeklerin gözlerini fototerapi cihazından gelen UV ışından korumak için kullanılırlar.

Fonksiyonu:

Bütün modellerde;Bant bebeğin gözünün üzerine gelerek bünyesindeki karbon içerikli köpük* sayesinde UV ışının geçişini engelleyerek fototerapi tedavisinde gözleri korur.

(Karbon içerikli köpük *Yapısında karbon taşıyan siyah renkte sünger) .

Teknik özellikleri:

Ürün 4 farklı modelde üretilmektedir (bkz. Model ve ölçüler başlığına).

Bandın parçaları birbirine lamine* edilmiş3 tabakadan meydana gelmiştir.

En üstteki tabaka şardonlanmış ** (tüylendirilmiş) kumaştan oluşmuştur. Bu tüycükler velkro*** sabitleme parçacıklarının bandı güvenle sabitlemesini sağlarlar.

Orta kısımda banda yumuşaklık sağlayan sünger tabaka vardır.

Bantların 4 modelinde cilde temas eden en alt tabakası ise pamuklu penyekumaştandır.

Ürünler tek kullanımlıktır ve Gama Işını ile sterilize edilmişlerdir.

(Lamine etmek*: (Laminasyon) Farklı malzemelerin ısı altında veya yapıştırıcı madde desteği ile özel yöntemler ve aparatlar kullanılarak birbirine yapıştırılıp tek parça haline getirilme işlemi).

(Şardonlamak:** Penye, pamuklu veya sentetik kumaşların yüzeylerinin özel bir metot ile tüylendirme işlemi, şardonlanmış kumaş ise bir yüzeyi tüylendirilerek yumuşak ve kadifemsi veya havlumsu hale getirilmiş kumaş)

(Velkro*:** Çıt çıt veya düğme yerine kullanılan, üzerinde mikro düzeyde plastik kancacıklar olan ve bu mikro kancalar ile tüylü yüzeylere yapışan özel kumaş -cırtlı kumaş).

Modeli / Kodu / Ölçüleri

Uygulamada farklı alışkanlıkları olan kullanıcılar için 4 farklı model Scützerved üretilmektedir.

Klasik üstten başbağlı model;



Erken doğan, yeni doğan ve iri bebeklerde kullanılması için; küçük, orta , büyük olmak üzere 3 farklı ebattadır.

Kodu :

PEB 301 Küçük

PEB 302 Orta

PEB 303 Büyük

Sırası ile; 25 cm, 31 cm ve 33 cm uzunluklarında ve 0,4 cm kalınlıklarındadır. Bandın bir ucunda sabitleme görevi yapan velkro kilit bulunur. Diğer kısmında ise bebeğin başının üzerinden geçerek bandın kaymasını önleyen başbağı şeridi vardır.

İki parçalı model;



Tek boydur.Başlık ve gözlük kısmı olmak üzere iki parçadan ibarettir. Başlık kısmı her ebattaki bebek başına uyabilmesi için perfore* edilmiştir.


Kodu:

PEB TP

Ölçüleri:25 + 19cm boyunda ve 0,4 cm kalınlığındadır.

(**Perfore etmek***Tekstil işlemi için kullanıldığında; bir malzeme üzerine delikler açmak veya kesiler yapmak çizikler,yarıklar açmak) .

Yapışkan etiketli model;

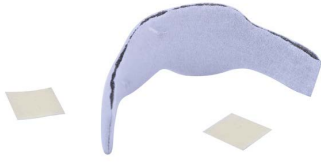

Erken doğan,yeni doğan ve iri bebeklerde kullanılması için; küçük, orta, büyük olmak üzere 3 farklı ebattadır.

Kodu:

PEB 301 STC Küçük

PEB 302 STC Orta

PEB 303 STC Büyük

Sırası ile;12 cm,17 cm ve 20 cm uzunluklarında ve 0,2 cm kalınlıklarındadırlar. Bandın kendinden bağımsız 2 adet kendiliğinden yapışanvelkro etiketi mevcuttur.Bu etiketler şakağa yapışarak üzerlerine iliştirilen bandı taşırlar ve bandın sabitlenmesini sağlarlar.

Yota Modeli;



Erken doğan, yeni doğan ve iri bebeklerde kullanılması için; küçük, orta, büyük olmak üzere 3 farklı ebattadır.

Kodu:

PEB 301 YT Küçük

PEB 302 YT Orta

PEB 303 YT Büyük

Sırası ile;24 cm,28 cm ve 33 cm uzunluklarında ve cm kalınlıklarındadırlar. Krep** kumaş cinsi kumaştan imal edilmiştir bu yüzden esnek file şeklinde yapıya sahiptir, bir şapka gibi başı sarar ve arka kısmında bulunan velkro kilit ile çevresi daraltılarak başa sabitlenir.

(**Krep kumaş**** Kullanım öncesibüzülmüş,buruşmuşbir dokuya sahip olan ancak kullanım esnasında esneyen ve file şeklinde gözenekleri açılarak hava ve ışık geçmesine izin veren özel dokuma tekniği ile üretilmiş kumaş.

Kullanımı:

Klasik üstten başbağlı model;

Koruyucu gözlüğü bebeğin gözüne yerleştirin.Burun üzerine gelen kısım burun deliklerini kapatıyor ise bu kısmı makas ile kısaltın.Gözlüğün iki ucunu başın arkasına getirerek birbirine sabitleyin.Başbağını bebeğin başının üzerinden getirerek gözlüğün üzerine sabitleyin Başbağının fazla gelen kısmını makasla kesin.

İki parçalı model;

Başlık kısmını bebeğin başının arkasına yerleştirin ve iki ucunu öne doğru getirin.Koruyucu gözlüğü bebeğin gözüne yerleştirin.Burun üzerine gelen kısım burun deliklerini kapatıyor ise bu kısmı makas ile kısaltın.Gözlük kısmını her iki ucundaki velkroları kullanarak başlık kısmının üzerine sabitleyin.

Yapışkan etiketli model;

Koruyucu gözlüğü bebeğin gözüne yerleştirin.Burun üzerine gelen kısım burun deliklerini kapatıyor ise bu kısmı makas ile kısaltın.Arkası yapışkanlı velkro etiketlerin kağıdını çıkarın ve bebeğin şakaklarına yerleştirin.Gözlüğün iki ucunu velkro etiketlerin üzerine getirerek sabitleyin.

Yota modeli;

Bandın gözlük kısmını bebeğin gözleri üzerine hizalayarak yerleştirin. Bandın uçlarını başın arkasına getirerek birbirine sabitleyin. Bandın alna gelen kısmını bandın gözler hizasına gelen kısmı ile kontrol edin ve bandı bebeğin başından kaymayacak şekilde ayarlayın.

Dikkat edilecek hususlar:

Tüm modellerin kullanımında ; bandın bebeğin göz hizasında olduğuna, gözleri iyice örttüğüne, yerinden kaymayacak şekilde güvenle sabitlendiğine, bebeğin başını sıkmadığına dikkat ediniz.

Ambalaj şekli:

Bir poşette bir ürün vardır , 25 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.