


# KULLANIM METODU


**BAREMED®**

**İDRAR KONTROL BANDI**


MODEL : STANDART  
REF. NO : UCB 6001

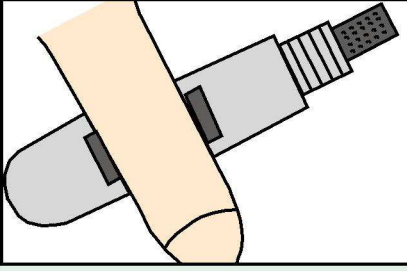


Bandı, silikonlu kısmı sertleşmemiş haldeki penisin altına gelecek şekilde yerleştirin

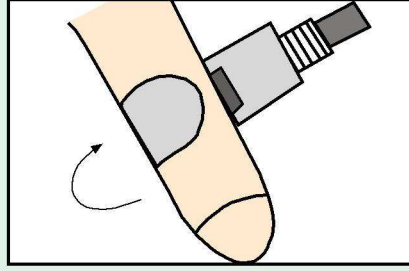

Oval ucunu penise sarın

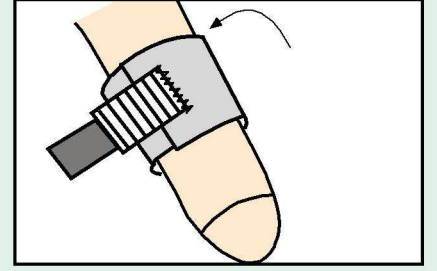


Düz ucunu oval ucun üzerine gelecek şekilde sarın

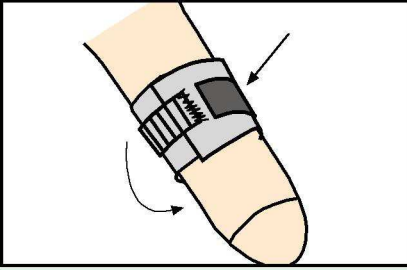

Lastik şeridi esneterek alttan getirin ve velkro (cırt) parçayı bandın üstüne iliştin



Bandın kan dolaşımını engellemediğinden emin olun

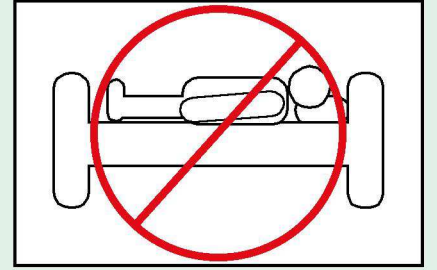

Uyku esnasında kullanmayın



Bandı mutlaka doktor kontrolünde kullanın. Bant sadece idrar kaçırmayı ve damlamayı önlemek içindir. Bandı kullanarak idrarınızı biriktirmeyin. Hissettiğinizde en kısa sürede boşaltımınızı yapın. Bandı kullanmadan önce vücudun idrar boşaltma periyodunu tespit edin ve idrarınızı minimum bu periyotlarda boşaltın.



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷  Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız