



KULLANIM METODU

CONDOFIX® İDRAR SONDASI SABİTLEME BANDI


MODEL :STANDART
REF. NO : CF 8001

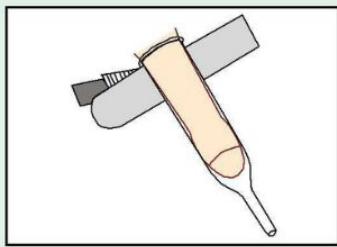


Bandı prezervatifin kenarına gelecek şekilde (sertleşmemiş haldeki) penisin altına yerleştirin

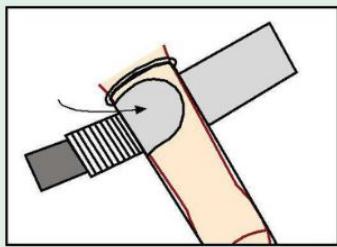


Oval ucunu prezervatife sarın

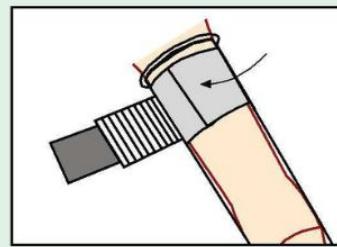

Düz ucunu da oval ucun üzerine gelecek şekilde sarın

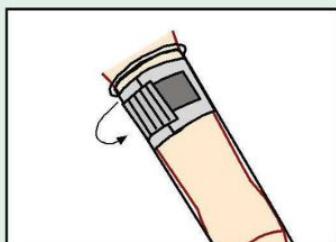

Lastik şeridi esneterek velkro parçası (cift parçası) bandın üzerine ilişirin

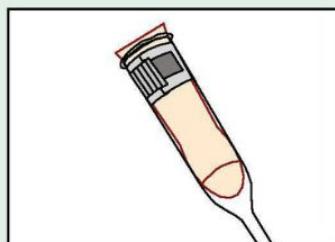

Bandın kan dolasımını engellemediginden emin olun



- ▷ Steril değildir
- ▷ 30° de yıkabilir
- ▷ Lateks yoktur
- ▷ Tek kullanımlıktır 