



**MEDİKOKİM**

## **KULLANIM METODU**

### **FERSEMED**

### **TOPUK KORUMA SÜNGERİ**

**MODEL : STANDART**

**REF. NO : HPS101**



*Hastanın ayak  
topuğunu süngerin  
içine yerleştirin.*



*Bandı velkro ile sabitleyin.*



*Bağlantı şeritlerinin kan dolasımını engellemediğini kontrol edin.*



▷ Steril değildir

▷ Tek kullanımlık

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız