




MEDİKOKİM


KULLANIM METODU

FIXERBOARD BEBEK İÇİN BİLEK DESTEK BANDI


MODEL : STANDART

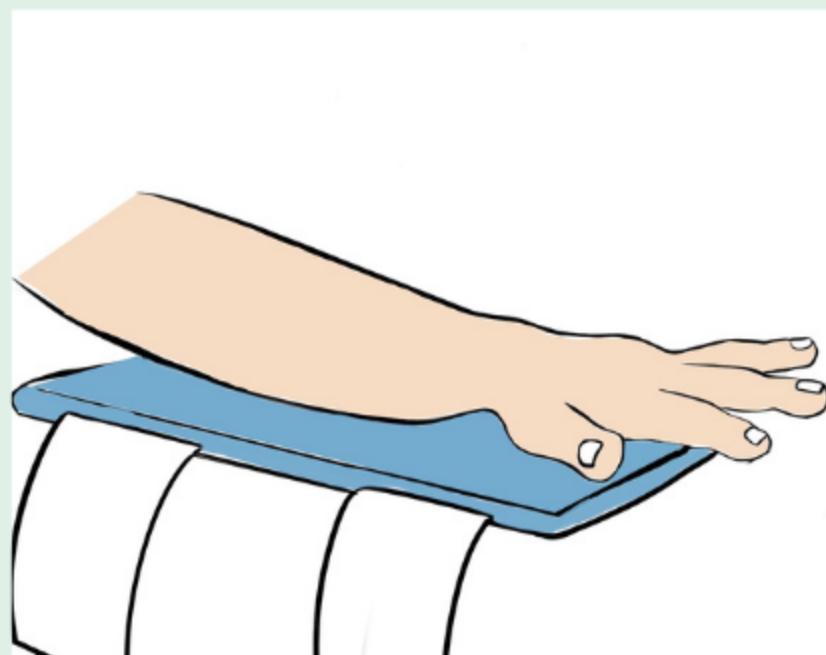


Bandı bileğe yerleştirin.

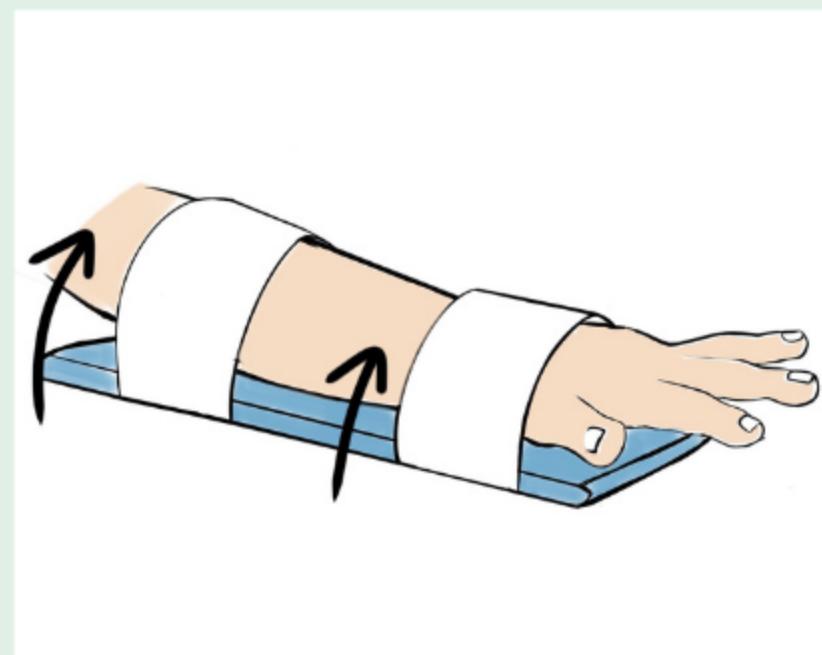

Bandı bileğe yerleştirin.

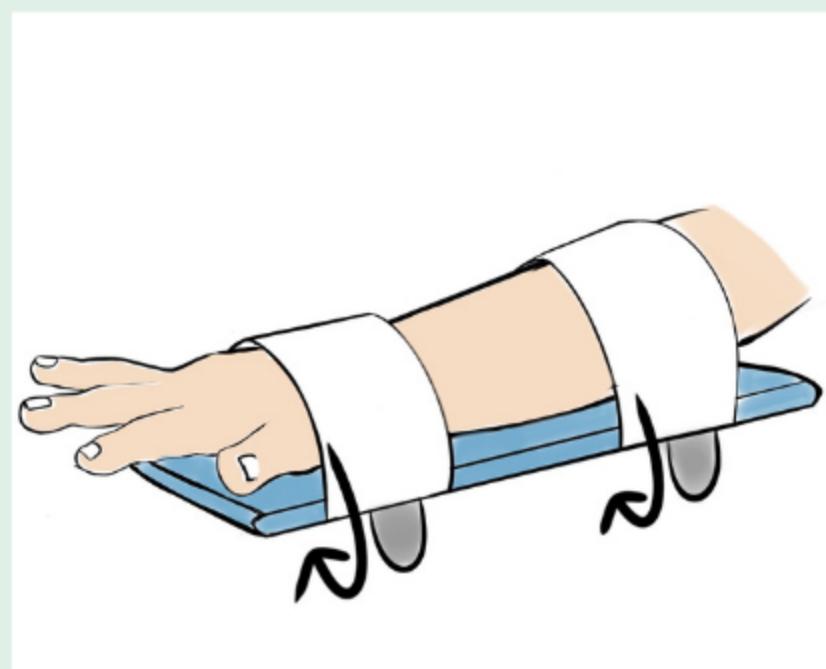

Bağlantı şeritlerini velkro
cırtlar ile bileğe sabitleyin.

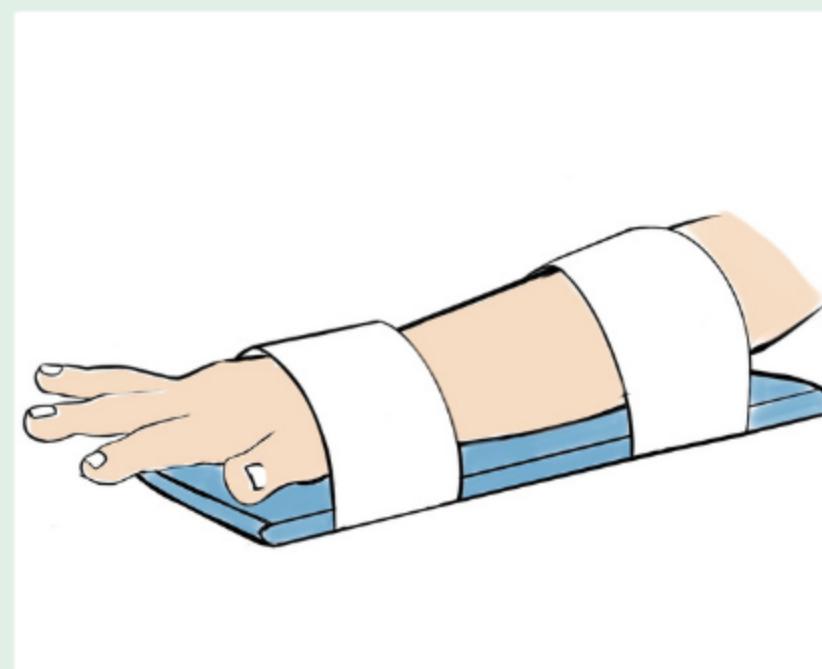

Bağlantı şeritlerinin kan
dolaşımını engellemediğini
kontrol edin.



- ▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş
- ▷ Tek kullanımlık
- ▷ Tekrar sterilize edilemez
- ▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınuz




MEDİKOKİM

KULLANIM METODU

FIXERBOARD

BEBEK İÇİN BİLEK DESTEK BANDI

MODEL : KÜÇÜK-ORTA-BÜYÜK-AYAK

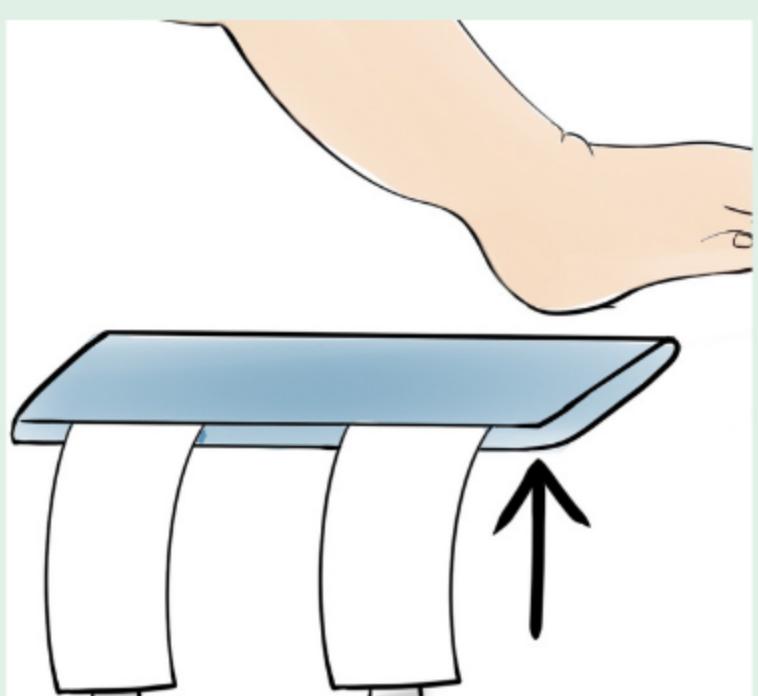


Bandı bileğe yerleştirin.




Bileğe göre biçimlendirin.



Bandın bağlantı şeritlerini bileğe sarın.

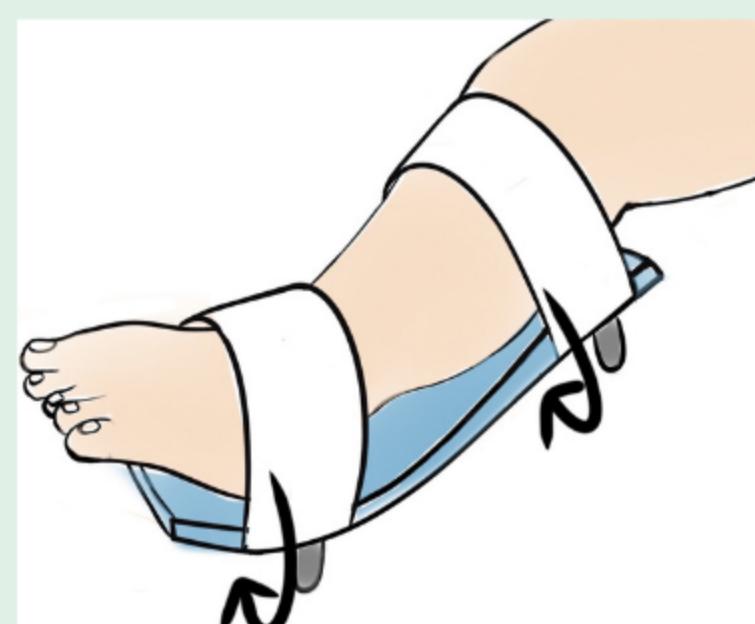

Bağlantı şeritlerini
velkro çırtları ile bileğe
sabitleyin.

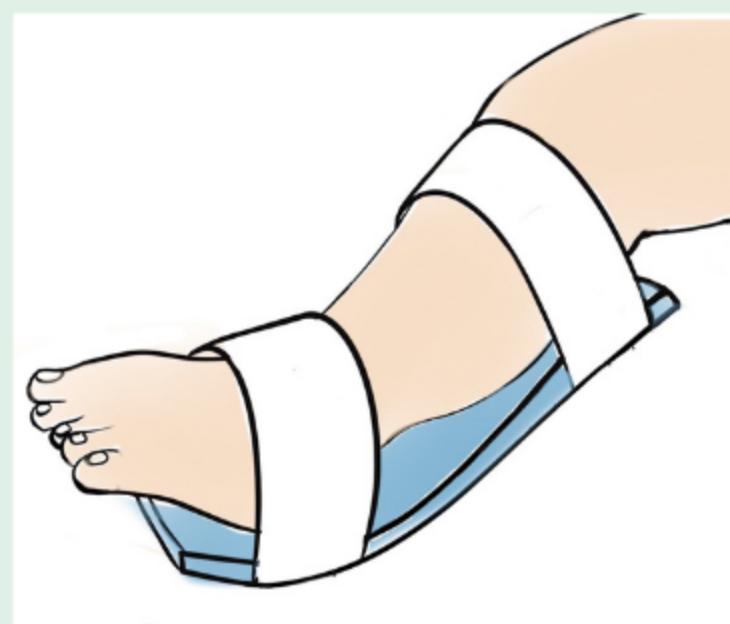

Bağlantı şeritlerinin kan
dolaşımını engellemeydiğini
kontrol edin.



► Gama ışını ile sterilize edilmiş

► Tek kullanımlık

► Tek kullanımlık

► Yırtık ve delik poşetleri kullanmayıniz