


KULLANIM METODU


MITTMED

YENİ DOĞAN PARMAK KONTROL ELDİVENİ


MODEL : STANDART
REF. NO : MITTP01/MITTP02/MITTP03

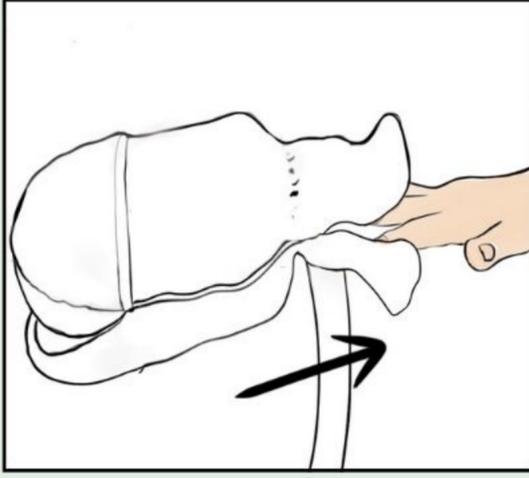


Eldiveni hastanın eline geçirin.

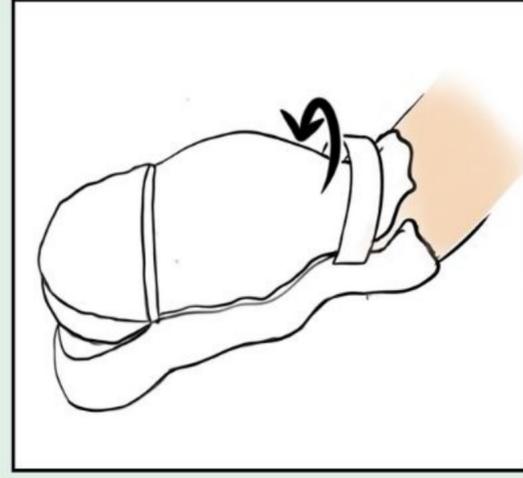

Parmakları açık bölüme geçirin.

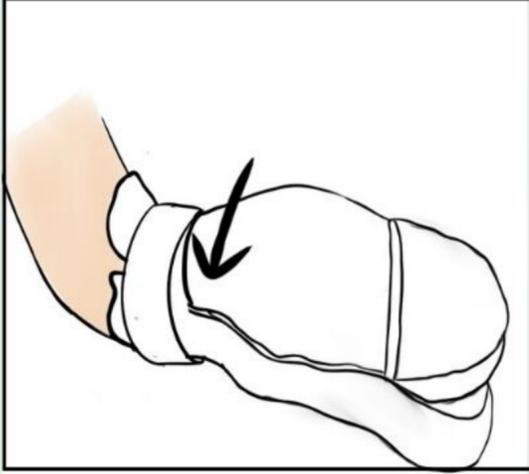

Bilek tokasından bandı bileğe sarın ve sabitleyin.

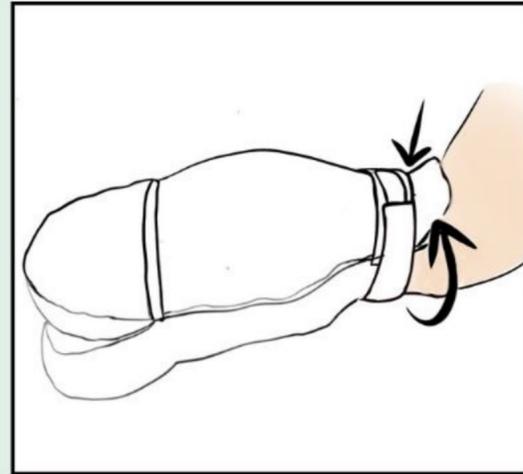

Bandın kan dolaşımını engellemediğini kontrol edin.



▷ Steril değildir

▷ 30°C'de yıkanabilir

▷  Tek kullanımlık


▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız

KULLANIM METODU


MITTMED

KAPALI PARMAK KONTROL ELDİVENİ


MODEL : KAPALI
REF. NO : MITTTCTW

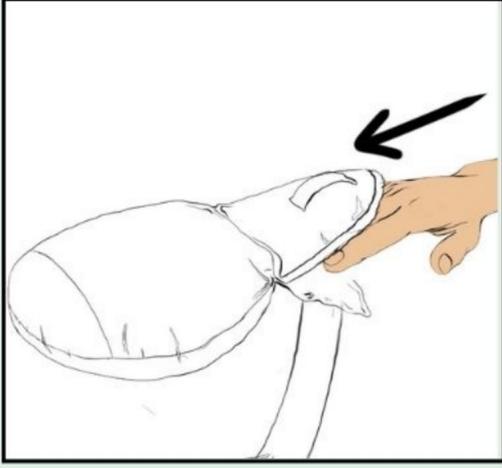


Eldiveni hastanın eline geçirin.

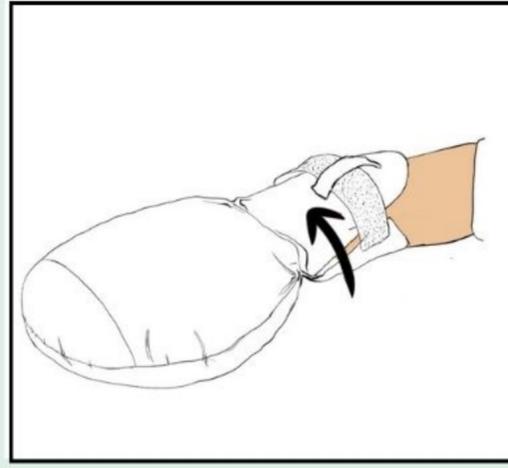

Bandı bilek tokasından geçirin.

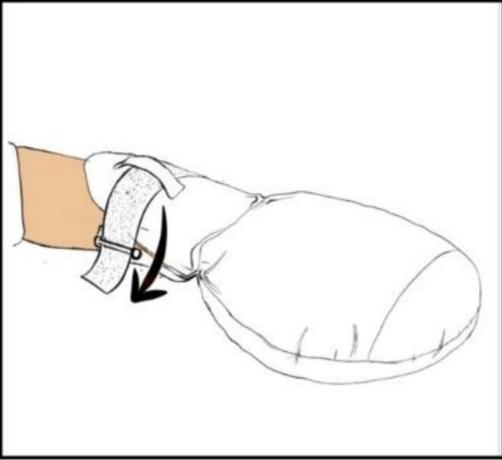

Bandı bileğe sarın ve velkro ile sabitleyin.

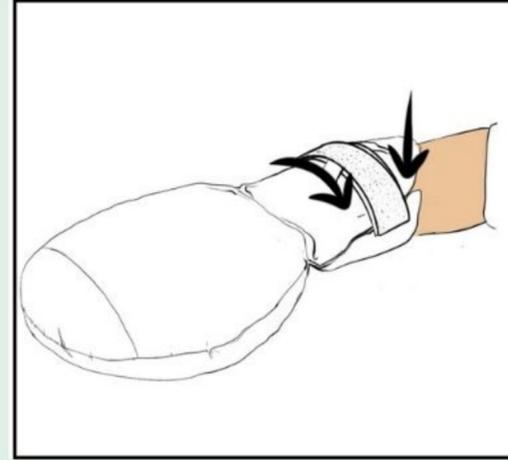

Bandın kan dolaşımını engellemediğini kontrol edin.



▷ Steril değildir

▷ 30°C'de yıkanabilir

▷  Tek kullanımlık


▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız

KULLANIM METODU


MITTMED

AÇIK PARMAK KONTROL ELDİVENİ


MODEL :AÇIK
REF. NO :MITTOTW

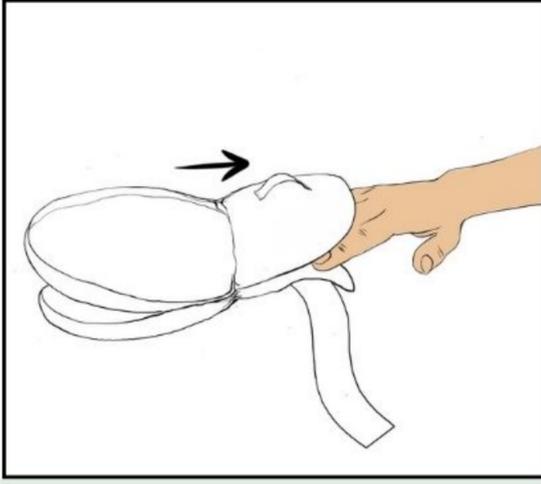


Eldiveni hastanın eline geçirin.

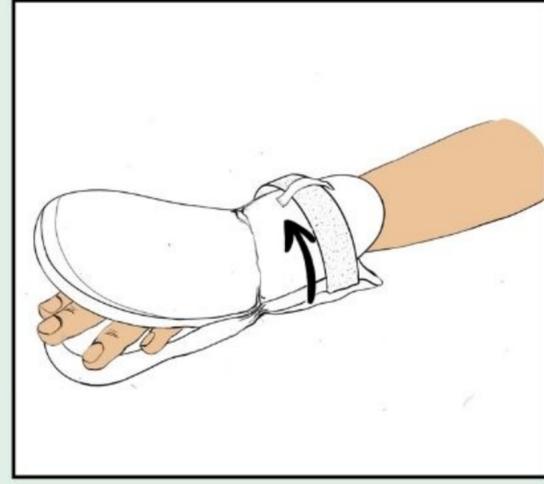

Bilek tokasından bandı geçirin.

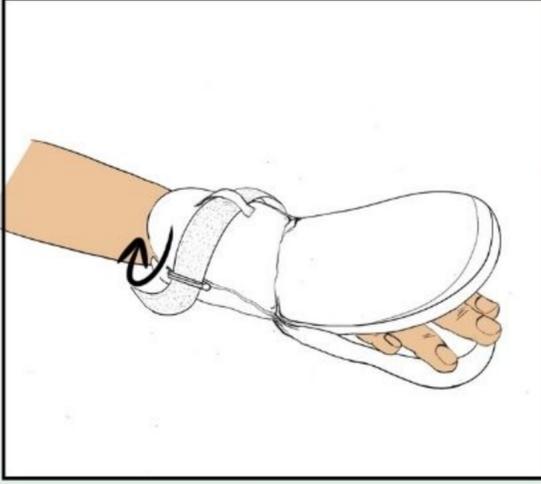

Bandı bileğe sarın ve sabitleyin.

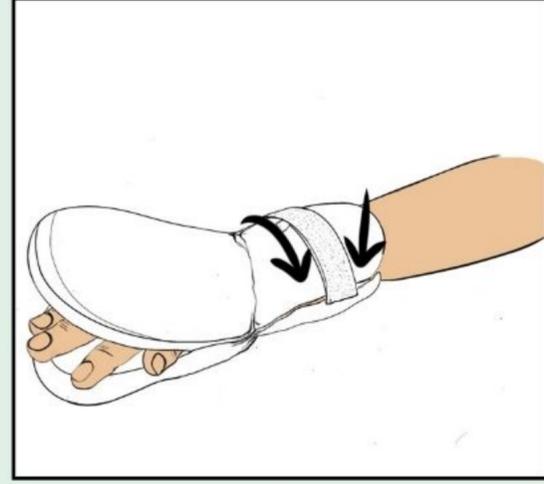

Bandın kan dolaşımını engellemediğini kontrol edin.



▷ Steril değildir

▷  Tek kullanımlık


▷ 30°C'de yıkanabilir

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız


KULLANIM METODU

MITTMED TERAPİ EL DİVENİ


MODEL : TERAPİ
REF. NO : MITTSRVTW

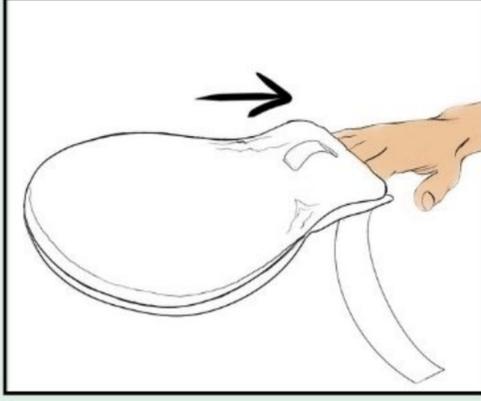


Eldiveni hastanın eline geçirin.

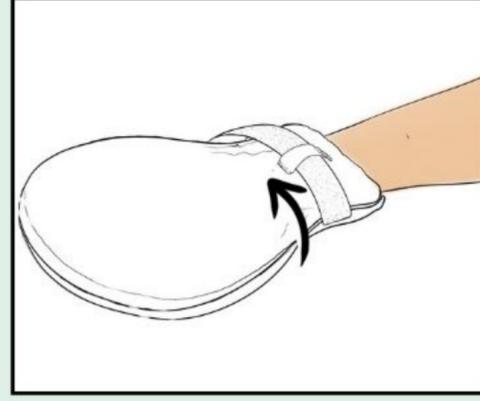

Bilek tokasından bandı geçirin.

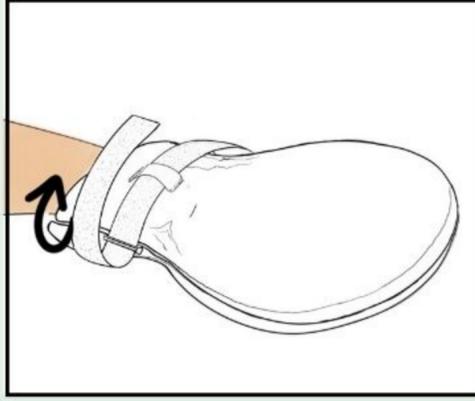

*Bandı tokadan geçirin.
Bandı hasta bileğine sarın.
Velkro ile sabitleyin.*

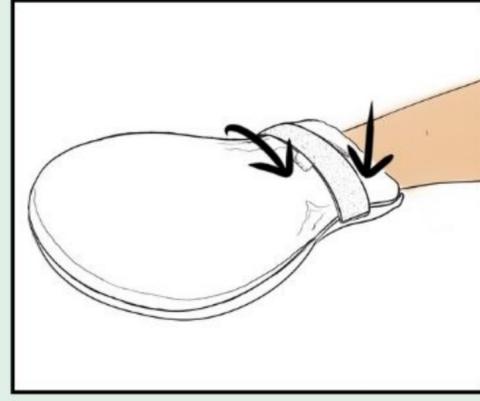

Bandın kan dolaşımını engellemediğini kontrol edin.



▷ Steril değildir

▷  Tek kullanımlık

▷ 30°C'de yıkanabilir


▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız

KULLANIM METODU


MITTMED

FİLELİ PARMAK KONTROL ELDİVENİ


MODEL:FİLELİ
REF. NO : MITTFC101

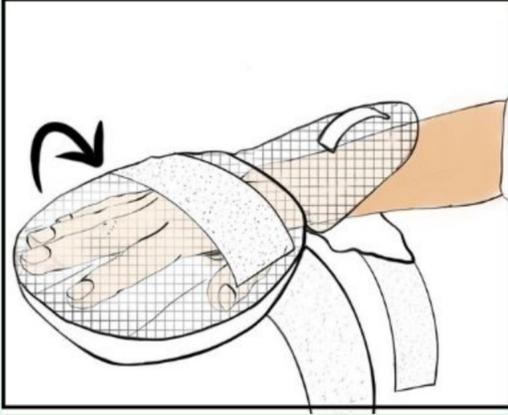


Eldiveni hastanın eline geçirin.

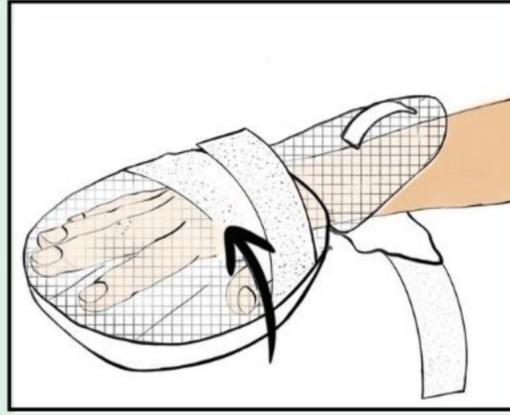


*Parmakların her birini
bir bölüme sokun.*

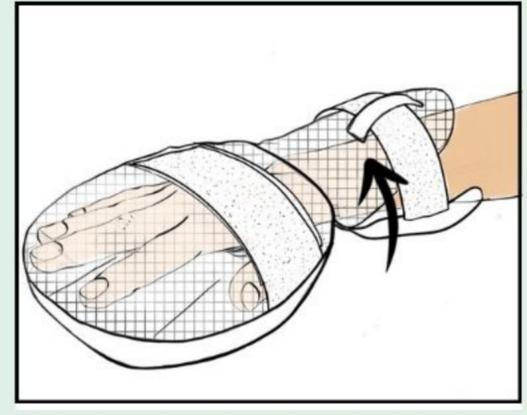


Bilek tokasından bandı geçirin

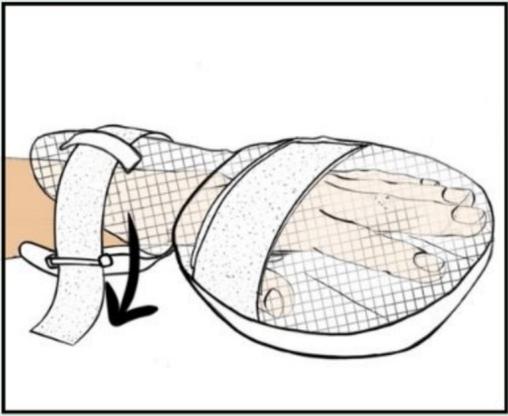

*Bandı velkro ile
sabitleyin*

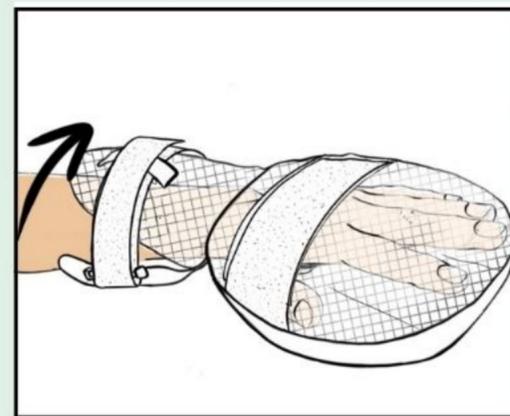

*Eldiveni hastanın bant ile
bileğine sabitleyin.*

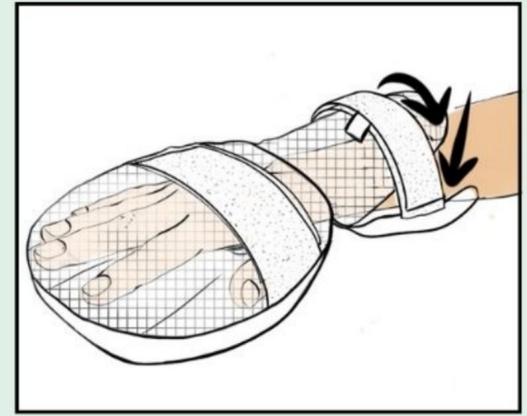

*Bandın kan dolaşımını
engellemediğini kontrol edin.*



▷ Steril değildir

▷  Tek kullanımlık

▷ 30°C'de yıkanabilir

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız