



KULLANIM METODU

NASOMED® **NASAL KANÜL SABİTLEME BANDI**


MODEL: YETİŞKİN
REF. NO: NTH 5002

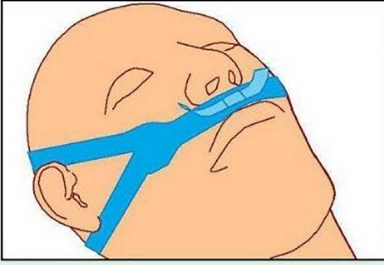


Sabitleme bandının dar kısmını dudağın üzerine yerleştirin

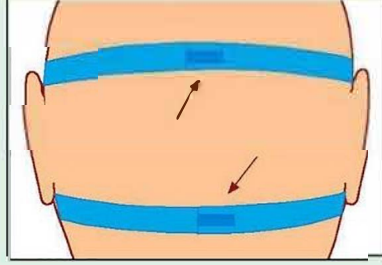


Uçlarını arkaya getirerek velkro parçalar ile birbirine irtibatlandırın

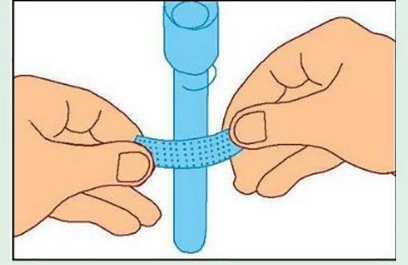


Arkası yapışkanlı velkro şeridi (cırtlı etiketi) tüpe sararak yapıştırın

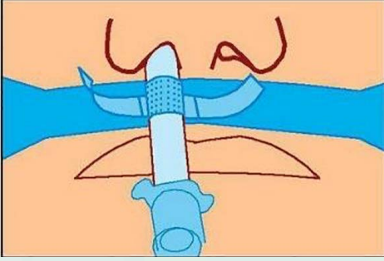

Tüpü bandın üzerindeki velkroya gelecek şekilde yerleştirin

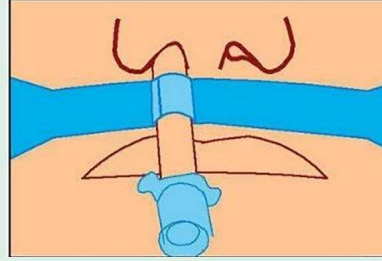

Tüpü bandın üzerindeki velkroya gelecek şekilde yerleştirin

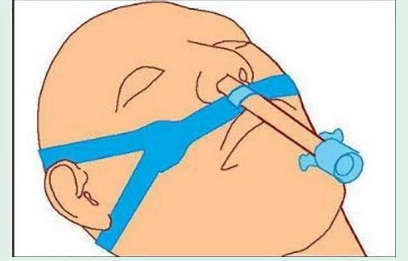

Bandın tüpü sabitlediğinden emin olun



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş
STERILE

▷ Tek kullanımlık (X)

▷ Tekrar sterilize edilemez


▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız

KULLANIM METODU


NASOMED®

NASAL KANÜL SABİTLEME BANDI


MODEL: BEBEK
REF. NO: NTH 5001

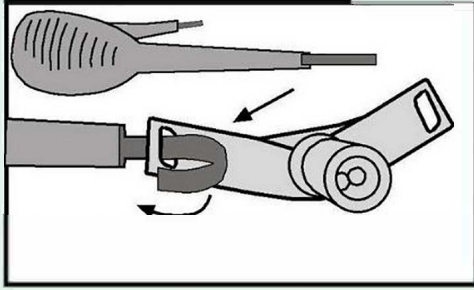


Bandın bir ucundaki velkro parçasını sondanın bir deliğinden geçirin

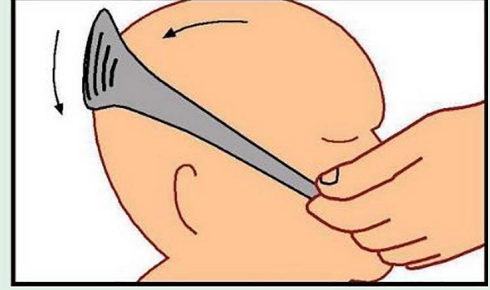

Başlık kısmını kafaya sararak uçlarını öne getirin ve diğer velkroyu deliğe geçirin

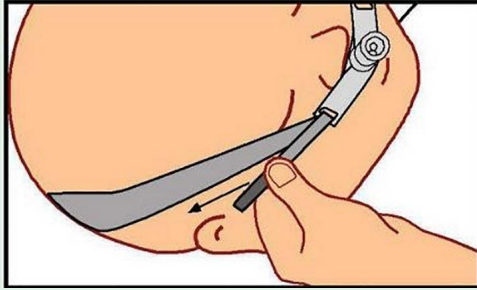

Sondayı burna takın ve bandın boyunu ve gerginliğini ayarlayın

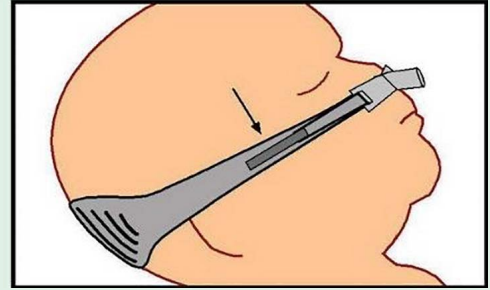

Velkro parçasını bandın üzerine iliştin. Bandın sondayı güvenle taşıdığından ve sabitlediğinden emin olun



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş
STERILE

▷ Tek kullanımlık (X)

▷ Tekrar sterilize edilemez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız


KULLANIM METODU

NASOMED TP


NASAL KANÜL SABİTLEME BANDI

MODEL : ÇOCUK


REF. NO : NTH 5001 TP

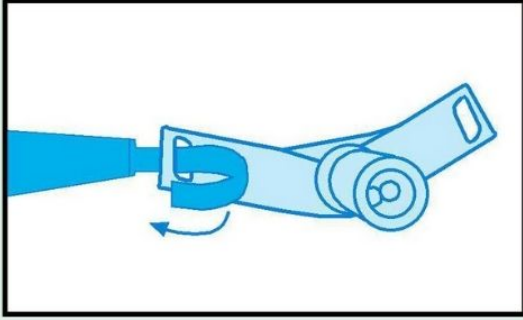


Bantların velkrolu uçlarını sondanın deliklerinden geçirin

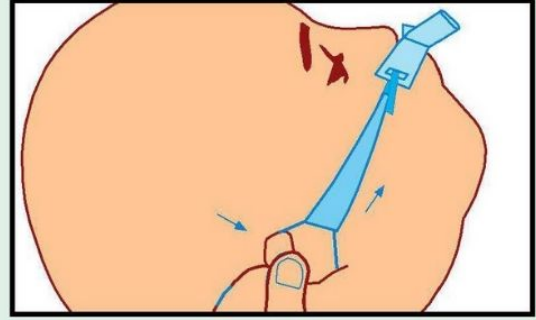

Bantların esnek halkalarını çocuğun kulaklarından geçirerek bandın uzunluğunu ayarlayın

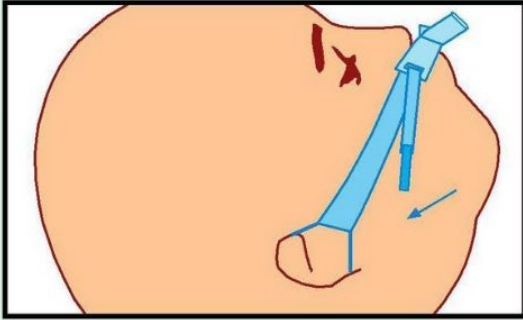

Velkro kilitleri bandın tüylü kısmına iliştin

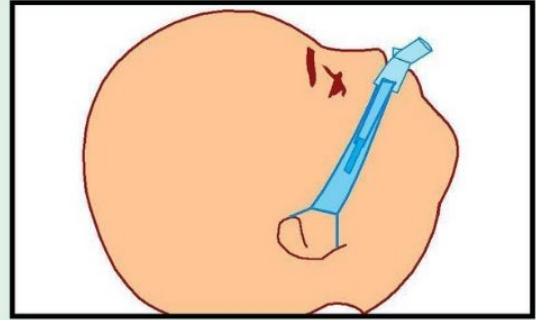

Bandın sondayı güvenle taşıdığından ve sabitlediğinden emin olun



▷ Gama ısıyı ile sterilize edilmiş
STERİL

▷ Tek kullanımlık (X)

▷ Tekrar sterilize edilemez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız