


## KULLANIM METODU

### STAENDERMED SC

#### ENDOTRAKİYEL TÜP SABİTLEME BANDI

MODEL : SİLİKONLU MODEL


REF. NO : ETH SC 101 - ETH SC 102

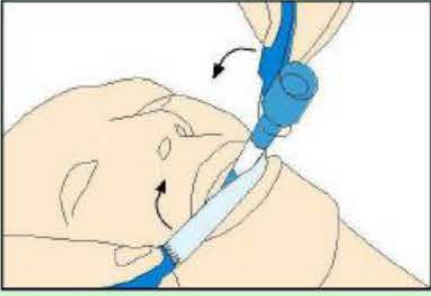


Sabitleme bandının  
silikonlu kısmını kanülün  
üzerine yerleştirin.




Bandın silikonlu kısmını kanüle dolayın.

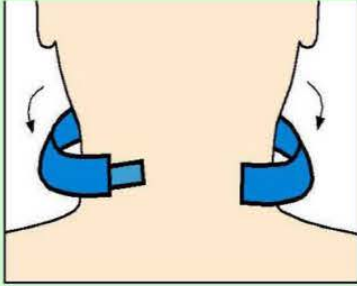

Sabitleme bantlarının  
uçlarını boynun arkasına getirin.

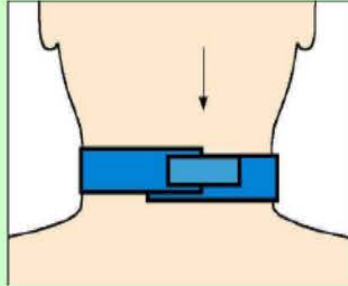

Bandın iki ucunu velkro ile  
birbirine sabitleyin.

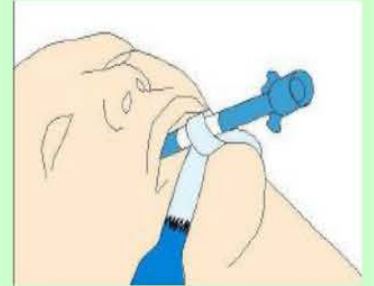

tüpün ağızda hareket  
etmediğini kontrol  
edin.



▷ Gama ışını ile  
sterilize edilmiştir

▷ Tekrar sterilize olamaz

▷ Tek kullanımlık

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız


## KULLANIM METODU

### STAENDERMED SCTP


#### ENDOTRAKİYEL TÜP SABİTLEME BANDI

MODEL : SİLİKONLU MODEL İKİ PARÇALI


REF. NO : ETH SCTP

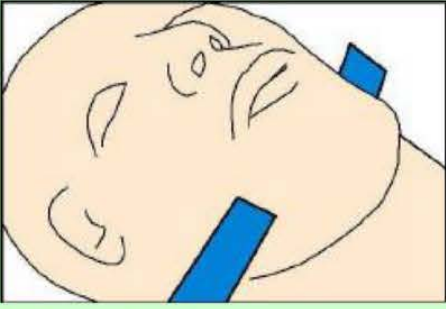


Sabitleme bandının uzun parçasını hastanın boynuna dolayın ve öne, yanaklara doğru getirin.

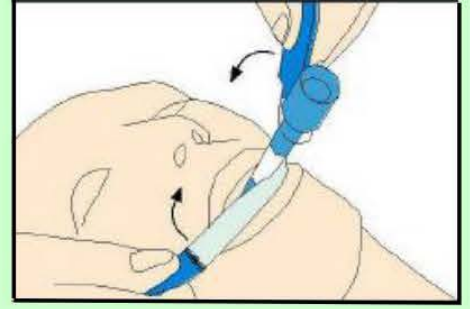

Sabitleme bandının silikonlu kısmını kanülün üzerine yerleştirin.

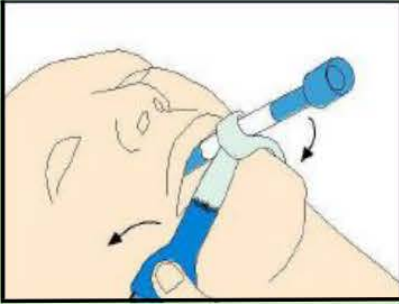

Bandı kanüle dolayın ve arkaya doğru getirin.

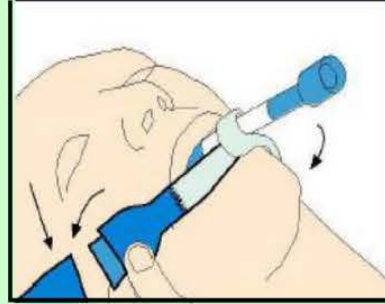

Kısa bandın iki ucundaki velkroları boyna doladığınız diğer parçanın üzerine iliştin.



Tüpün ağızda hareket etmediğini kontrol edin.



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiştir

▷ Tekrar sterilize olamaz

▷ Tek kullanımlık

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız


## KULLANIM METODU

### STAENDERMED ST


#### ENDOTRAKİYEL TÜP SABİTLEME BANDI

MODEL : STİCKERLI MODEL


REF. NO : ETH 101 - ETH 102

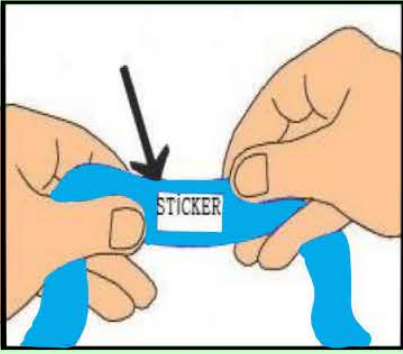

Bandın dar kısmında bulunan yapışkanlı bandın kağıt etiketini sökün.

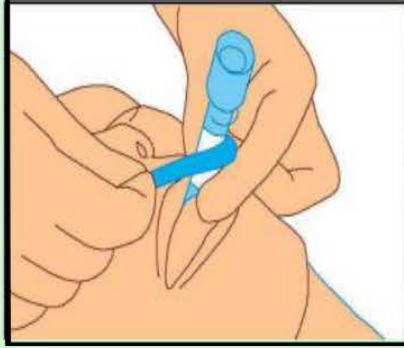


Bandın dar kısmını yapışkanlı etiket kanüle gelecek şekilde yerleştirin.

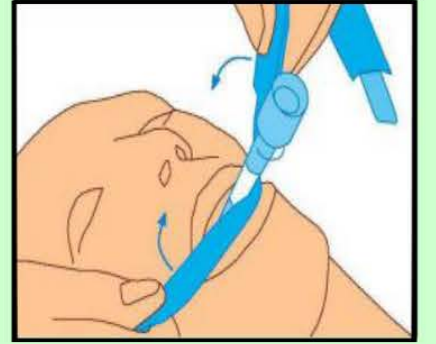

Her iki ucu bant kanülü saracak şekilde kanüle dolayın.



Sabitleme bandının uçlarını boynun arkasına doğru getirin.

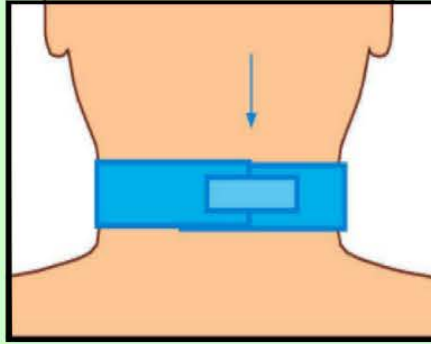

Bandın iki ucunu velkro ile boynun arkasında birbirine sabitleyin.



Tüpün ağızda hareket etmediğini kontrol edin.



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiştir

▷ Tekrar sterilize olamaz

▷ Tek kullanımlık

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız


## KULLANIM METODU

### STAENDERMED STTP


#### ENDOTRAKİYEL TÜP SABİTLEME BANDI

MODEL : STİCKERLİ MODEL İKİ PARÇALI


REF. NO : ETH STP

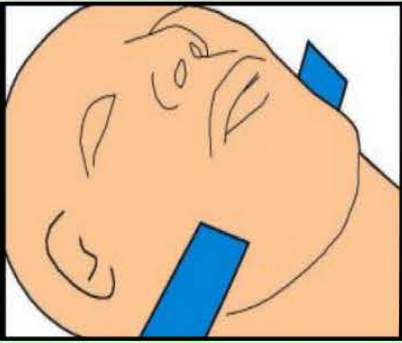


Sabitleme bandının uzun parçasını hastanın boynuna dolayın ve öne, yanaklarına doğru getirin.

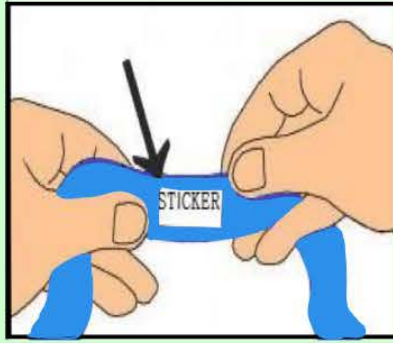


Bandın dar kısmında bulunan yapışkan bandın kağıt etiketini sökün.

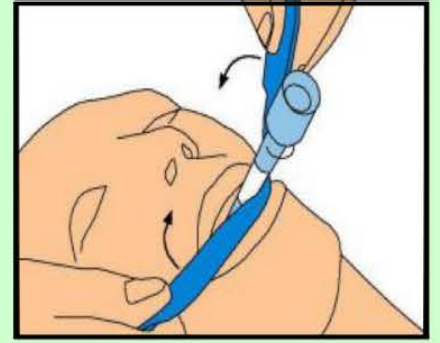


Bandın dar kısmını yapışkanlı etiket kanüle gelecek şekilde yerleştirin.

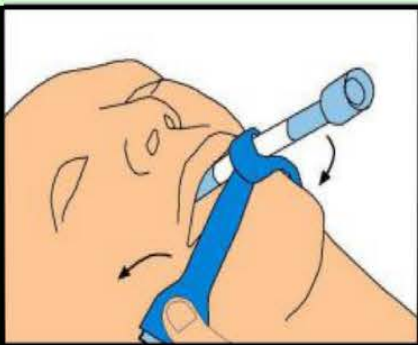

Her iki ucu bant kanülü saracak şekilde kanüle dolayın.

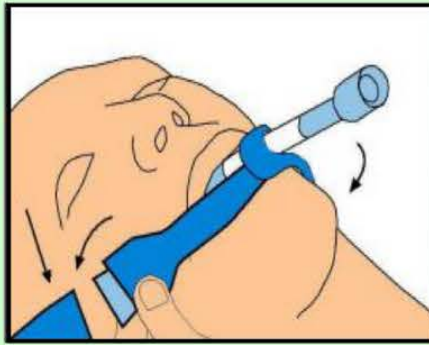

Kısa bantın iki ucundaki velkroları boyna doladığınız diğer parçanın üzerine iliştirin.

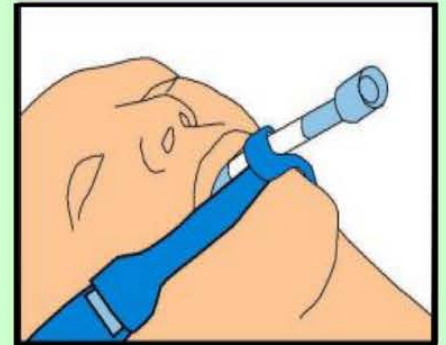

Kısa bantın iki ucundaki velkroları boyna doladığınız diğer parçanın üzerine iliştirin.



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiştir

▷ Tekrar sterilize olamaz

▷ Tek kullanımlık

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız

## KULLANIM METODU

### STAENDERMED CLP


#### ENDOTRAKİYEL TÜP SABİTLEME BANDI

MODEL : KEMPLİ MODEL


REF. NO : ETH CLP 101- ETH CLP 102




Bandın kempli bölümünü hastanın dudagının üzerine gelecek şekilde yerleştirin.

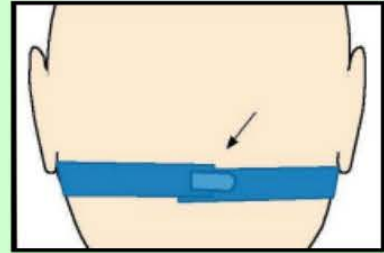


Bandın uçlarını hastanın ense kısmına getirerek velkro ile sabitleyin.

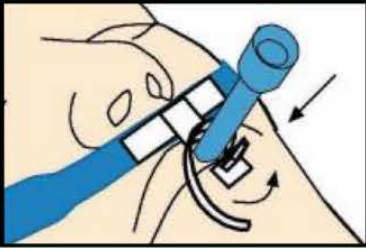

Endotrakiyel kanülü klempin yuvasından geçirek hastanın ağızına yerleştirin.

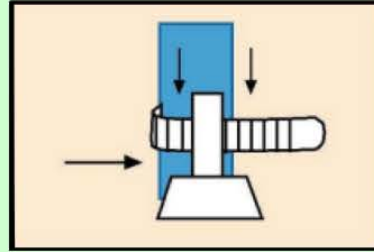

Klempı sıkarak kanülü sabitleyin.

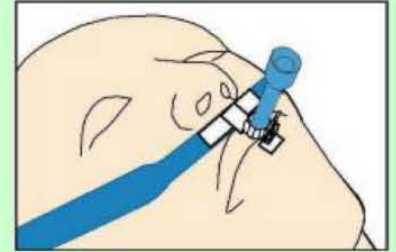

Klempin kanülü sabitlediğini ve bandın hastanın boynunu sıkmadan sabitlendiğini bir kez daha kontrol edin.



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiştir

▷ Tekrar sterilize olamaz

▷ Tek kullanımlık

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız


## KULLANIM METODU

### STAENDERMED CLTP

#### ENDOTRAKİYEL TÜP SABİTLEME BANDI

MODEL : KLEMLİ MODEL İKİ PARÇALI

REF. NO : ETH CLP TP

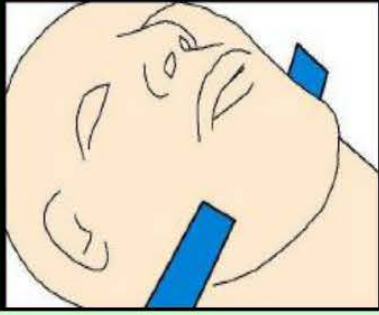


Sabitleme bandinin uzun parçasını hastanın boynuna dolayın ve öne, yanaklarına doğru getirin.




Bandin klempli bölümünü hastanın dudağının üzerine gelecek şekilde yerleştirin.




Endotrakiyel kanülü klempin yuvasından geçirerek hastanın ağızına yerleştirin.

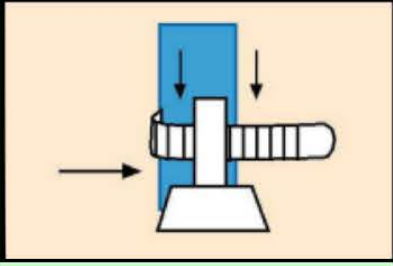

Klempi sıkarak kanülü sabitleyin.

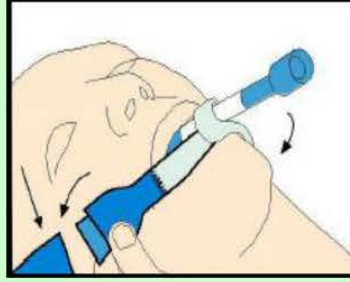

Kısa bandın iki ucundaki velkroları boyna doladığınız diğer parçanın üzerine iliştin. bir kez daha kontrol edin.

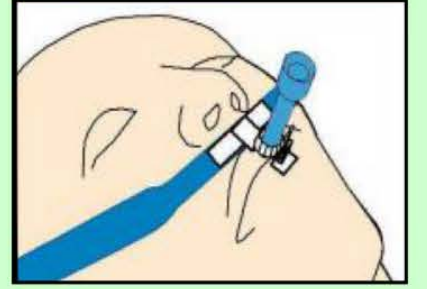

Klempin kanülü sabitlediğini ve bandın hastanın boynunu sıkmadan sabitlendiğini bir kez daha kontrol edin.



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiştir

▷ Tekrar sterilize olamaz

▷ Tek kullanımlık

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız